

2009年1月改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

無色殺菌剤配合救急絆創膏

新カットバン[®].A 伸縮布

第3類医薬品

- 湯・水仕事にも強い粘着力を示します。
- 伸縮性のあるソフトな布絆創膏でお肌になじみます。
- やわらかな綿包パッドが傷をやさしくまもります。

【使用上の注意】**相談すること****1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。**

- (1)本人又は家族がアレルギー体質の人
- (2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、皮膚はく離

(その他の注意)

使用後はがすときは、患部やまわりの皮膚を痛めないようにゆっくりとはがしてください。

風呂上りなど皮膚の表面がやわらかくなっていると思われるときは特にゆっくりとはがしてください。

【効能・効果】 切り傷、すり傷、かき傷、靴ずれの創傷面の殺菌消毒および保護**【用法・用量】** ライナーをはぎとりパッドを患部にはってください。**用法・用量に関連する注意**

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)患部を清潔にし、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。
- (3)粘着面を患部にはらないでください。
- (4)パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、はり替えてください。

【成分・分量】 パッド 1,000g 中

ベンザルコニウム塩化物……………0.90g

パッド部分：ガーゼ、脱脂綿、添加物としてポリビニルアルコール(完全けん化物)を含有します。

テープ部分：添加物としてBHT、精製ラノリン、エステルガム、酸化亜鉛、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、脂肪族炭化水素樹脂、酸化チタン、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。

使用後、粘着剤が皮膚に残った場合には、はがしたテープの粘着剤面で軽くこすれば取り除けます。

【包 装】 (L) 25mm×72mm (パッド 19mm×24mm)
(M) 19mm×72mm (パッド 13mm×24mm)

製造販売元

祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1

[お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日は除く)